

“寶美迪” 保利穩安全靜脈留置針

“Poly Medicure” Polywin Safety I.V. Cannula without injection port & wings

衛部醫器輸字第 037300 號

使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用

■ **產品敘述**

本產品用於靜脈注射、靜脈輸液、抽取血液樣本及藉由靜脈注射將液體及藥品輸進人體循環系統。

■ **適應症**

- 輸液、不經腸營養品及藥物。
- 維持水分補給及/或治療無法口服足量液體患者的脫水問題。

■ **禁忌症**

- **輸注高黏稠性液體**
- **用於已知對本產品材質過敏的患者**

■ **目標患者**

多數住院、加護病房、急診室患者及需要靜脈注射的門診患者。

■ **操作者**

受過輸注技術訓練的醫事人員。

■ **不良反應及可能副作用**

包括感染、靜脈炎、血栓性靜脈炎、血栓、疼痛、血腫或出血、留置針斷裂及外滲、留置針阻塞、動脈留置與針刺傷害。為了將前述風險降至最低，請遵照原廠之說明書的指示。

■ **使用方法**

1. 依患者的生理情形及臨床需求選取適當尺寸的產品。在能充分輸送欲進行之靜脈輸液前提下，請選擇最小的尺寸。
2. 請小心選擇與清潔穿刺部位。
3. 將本產品從包裝中取出前請先檢查包裝的完整與確認保存期限。
4. 移除針蓋並握住針柄。
5. 以低角度將本產品插入靜脈，檢查回血腔內是否有血液回流以確認有確實穿刺入靜脈。
6. 將留置管推進靜脈，同時以快速連續的動作將針頭平行於皮膚抽出。
7. 抽出針頭時強烈建議不要旋轉(順時針/逆時針)針柄。
8. 被動式針尖保護套會自動覆蓋針頭的尖銳面。
9. 請不要用手碰觸針尖保護套。

10. 立即將針頭丟棄尖銳物廢棄筒中。
11. 用手指按壓靜脈或留置管尖端以免血液溢出。
12. 用膠帶將導管固定至患者的皮膚上。
13. 不使用時請將注射口蓋上。
14. 請定期檢查靜脈穿刺部位及所有連接管路。

■ 注意事項


- 依使用機構的政策、程序及操作指引維持留置管的通暢。
- 考量患者姿勢及臨床情形後，請選擇較小的尺寸(例如外徑)及類型。
- 小心清潔穿刺部位，僅在經過消毒並完全乾燥後才能進行穿刺。
- 用優碘(povidone iodine)或氯己定(chlorhexidine 0.5% in alcohol)等經核可的消毒劑清潔穿刺部位。請注意酒精等有機溶劑可能會與本產品產生交互作用並使之弱化。
- 儲存在 5 °C 至 35 °C 的環境中，請避免過熱，並遠離陽光直射及濕度。
- 每日檢查留置管是否有感染跡象。若懷疑有感染、不再需要留置管或依醫療院所的程序或操作指引等要求所需時，請更換或移除留置管。
- 單次使用後即請丟棄整組產品。請依醫療院所的程序或當地法規更換或丟棄。

■ 警告


- 使用前請詳閱警告、注意事項及原廠之說明書。
- 使用前請檢查本產品及其包裝的完整性及保存期限。
- 若本產品或包裝(無菌屏障)破損或受汙染，則請勿使用。
- 開啟單獨包裝後請立即使用本產品。
- 請勿讓留置管接觸丙酮或類似溶劑，這些溶劑會弱化留置管並導致滲漏或破裂。
- 請勿在穿刺區域周圍使用剪刀或其他切割用器械，可能會對留置管造成傷害或意外切斷管線。
- 請勿用力拉扯或推動留置管，也請勿彎折留置管以免其受損或從接頭脫落。
- 請勿嘗試再次插入已部分或完全抽出的針頭。
- 請勿重複滅菌本產品。重複使用會使本產品的機械或生物特性改變，並可能導致產品失效、過敏反應或細菌感染。
- 僅有資格的醫事人員能使用本產品。
- 嚴禁將氣體供應管、腸道灌食袋、抽吸管及其他不相容的接頭接上本產品。
- 錯誤或重複使用本產品所造成的意外或傷害，製造業者不負責。

■ 安全機制

使用前

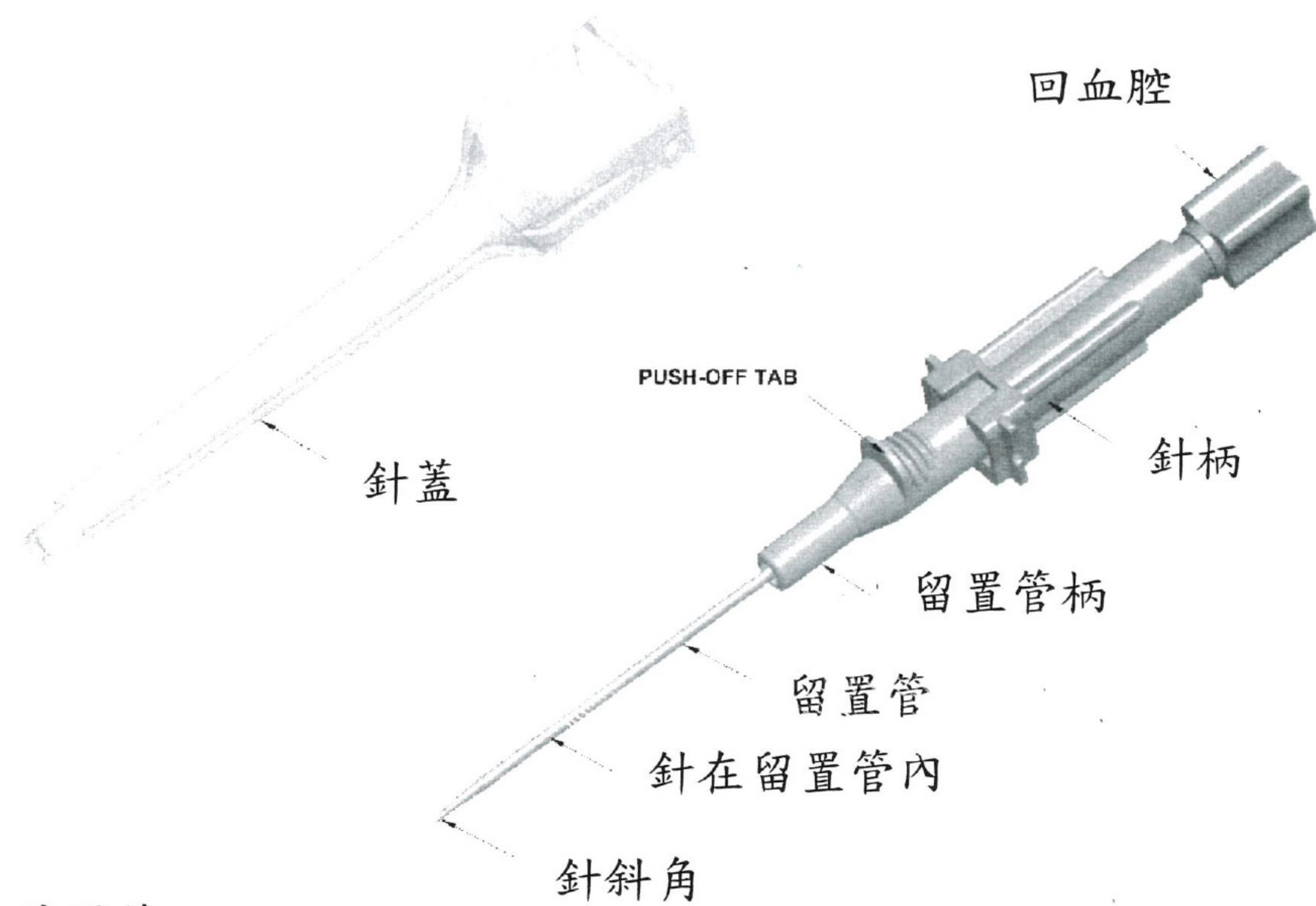

使用後

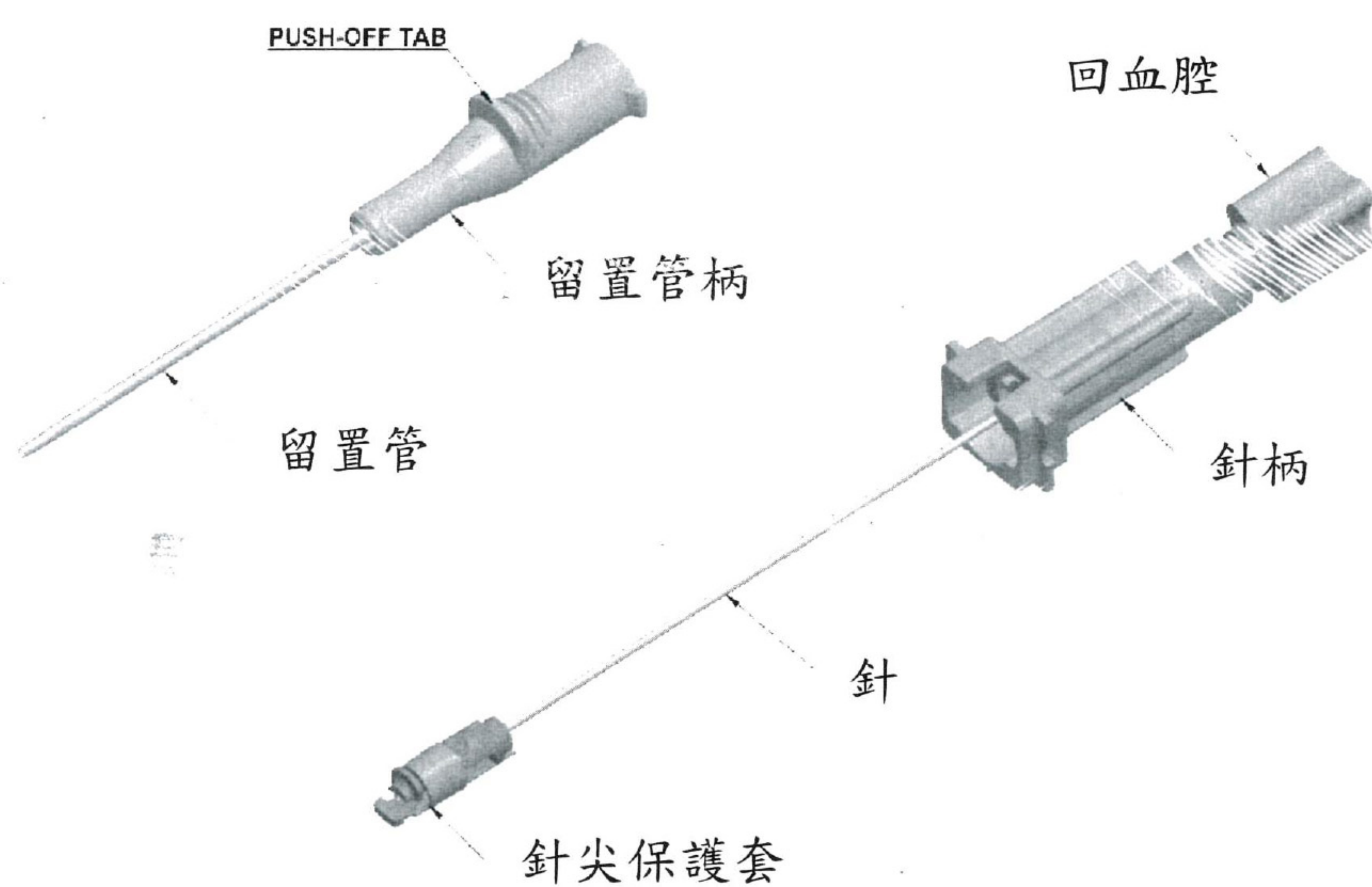

■ 規格

POLYWIN SAFETY

尺寸	顏色	導管外徑(mm)	導管長度(mm)	液體流速 (ml/min)
14G	橘色	2.0	45	305
16G	灰色	1.7	45	200
17G	白色	1.5	45	142
18G	綠色	1.3	45	100
18G	綠色	1.3	32	105
20G	粉色	1.1	32	61
20G	粉色	1.1	25	65
22G	藍色	0.9	25	36
24G	黃色	0.7	19	23

26G	紫色	0.6	19	17
-----	----	-----	----	----

製造業者名稱：Poly Medicure Limited

製造業者地址：Plot No. 115-116, Sector-59, HSIIDC Industrial Area, Ballabgarh, Faridabad
Haryana, 121004, India

醫療器材商名稱：勤達醫療器材股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

產品照片：

